

**VINIL MÉDICA**



**CÓDIGO:** 10.81.076.11

**COR:** Transparente

**TAMANHOS:** 7(P), 8(M), 9(G), 10(GG)

**COMPOSIÇÃO:** Vinil

**CA:** 21.088 **VALIDADE DO CA:** 23/11/2027

**VALIDADE DO PRODUTO:** 5 anos a partir da data de fabricação

**REGISTRO ANVISA:** 81981090024



**DESCRIÇÃO**

Luva para procedimentos não cirúrgicos confeccionada em vinil, sem pulverização de pó bioabsorvível/amido, ambidestra, superfície externa lisa, não estéril.



**INDICADA PARA**

Indicada para a proteção das mãos de trabalhadores da saúde durante procedimentos não cirúrgicos leves (administração de medicação oral, remoção e/ou substituição de roupas de cama de pacientes, colocação de equipamento de ventilação não-invasiva e cânula de oxigênio) e médios (afecção de pressão arterial, temperatura ou pulso do paciente, aplicação de injeção subcutânea ou intramuscular, administração de cuidados aos olhos e ouvidos - sem secreções, ao dar banho ou vestir pacientes) em hospitais, clínicas, laboratórios, clínicas estéticas, consultórios odontológicos.

**NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS**

*Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual ISO 11193-2:2013 - Luvas para procedimentos não cirúrgicos.*



**ISO 374:2019 - Riscos Químicos - Tipo B**

Produto Químico	Classe	Nível
Hidróxido de sódio 40%	K	6
Ácido sulfúrico 96%	L	1
Hidróxido de amônio 25%	O	6
Peróxido de hidrogênio 30%	P	6
Formaldeído 37%	T	1

**ISO 374:2019**  
**Tipo B**



**EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS**

Tamanho	EAN13 (Inner com 100 peças)	DUN 14 (Caixa com 10 inners)
7 (P)	7898207219126	17898207219123
8 (M)	7898207219133	17898207219130
9 (G)	7898207219140	17898207219147
10 (GG)	7898207219157	17898207219154

**INSTRUÇÕES DE USO**

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Lave as mãos com sabonete antisséptico e seque-as bem, a fim de evitar contaminações cruzadas e descolorações das luvas enquanto em uso;

Verifique se as luvas não possuem furos e/ou sujidades

Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos. Em caso de danos e/ou mudanças de atividades, troque imediatamente as luvas, a fim de evitar contaminações cruzadas;

Para calçá-la, retire uma peça de luva de sua caixa original, tocando apenas uma área restrita da superfície da luva, correspondente à região do punho, calce-a cuidadosamente. Retire a segunda peça da caixa com a mão sem luva e toque apenas na região do punho; A fim de evitar contato com a pele do antebraço com a mão já calçada, dobre a parte externa da luva a ser calçada nos dedos dobrados da mão calçada, permitindo o calçamento da segunda luva; Após calçamento de ambas, as mãos não devem tocar nada que não esteja definido pelas indicações e condições de trabalho. Para retirá-la, puxe-a próximo ao seu punho em direção à ponta dos seus dedos até que a luva se dobre, pegue cuidadosamente a dobra e puxe em direção às pontas dos seus dedos, colocando-a do avesso, continue puxando-a até que a luva seja totalmente removida; Para a remoção da outra luva, escorregue o dedo indicador da mão sem luva por baixo da luva que permanece, continue a inserir seu dedo em direção à sua ponta até que, quase metade do dedo esteja sob a luva; Gire seu dedo a 180° e puxe-a ao avesso em direção à ponta dos dedos. À medida que fizer isso, a primeira luva retirada será contida dentro da segunda, o lado interno da segunda luva também será virada do avesso; Pegue as luvas firmemente através da superfície não-contaminada e descarte-as adequadamente. Em seguida, realize a higiene das mãos com preparação alcoólica ou com água e sabonete antisséptico.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Produto de uso único;

Destruir após o uso;

Proibido reprocessar;

Não estéril;

O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não isenta a ação de higiene das mãos friccionando-as com preparações alcoólicas ou com sabão antisséptico e água.

## INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado;

Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade excessiva;



Durante a movimentação e armazenagem manter em suas embalagens primárias (display plástico/papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI;


Condições impróprias de armazenagem podem reduzir o tempo de vida útil da luva.

## DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

## CENTRAL DE RELACIONAMENTO VOLK DO BRASIL

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

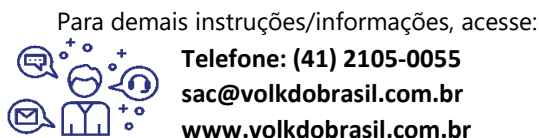

Para demais instruções/informações, acesse:

**Telefone: (41) 2105-0055**

**sac@volkdo brasil.com.br**

**www.volkdo brasil.com.br**

Atualizado em Dezembro 2022